

Prøverørsoversigt

WebReq blanket udskrives lige inden prøvetagning – husk patientidentifikation

Prøverørene tages i den viste rækkefølge

ILS varenr. (Item nr)	Illustration/propfarve	WebReq	Beskrivelse	Behandling
474001 454332		Blå3,5	Koagulation* Na-citrat 3.2 % 3,5 mL	Vendes 5 gange
474043 366674		Sort5,2	Sænkingsreaktion* Na-citrat 3.2% 5,2 mL	Vendes 5 gange
134103 454204		Rød4	Serum Fx specielle hormoner Tørsprayet clotaktivator 4 mL	Vendes 5 gange
134104 456089		Rød6	Serum Fx SSI, Double, Medika- menter Tørsprayet clotaktivator 6 mL	Vendes 5 gange
134107 456018		Gul5	Serum gel Allergi, Ige Tørsprayet clotaktiva- tor/gel 5 mL	Vendes 5 gange
134108 454029		Grøn4	Biokemi. Li-heparin rør 4 mL	Vendes 5 gange
134112 454209		Lilla4	EDTA Hæmatologi, HbA1c, PTH, Tørsprayet K2EDTA 4 mL	Vendes 5 gange
474022 456043		Lilla6	EDTA TYPE, BAC, Hepatitis Tørsprayet K2EDTA 6 mL	Vendes 5 gange
506134 454513		Rosa	Glucoserør Flourid-citrat-EDTA (FC Mix Tube) 3 mL	Vendes 10 gange
474045 450239			Kanyle præmonteret m. sikkerhed LANG 21Gx1½" (38 mm lang)	
524503 450235			Kanyle præmonteret m. sikkerhed KORT 21Gx1" (25 mm lang)	
134114 454241			Afpipetteringsrør Rørene anvendes til afpipettering af centrifugerede prøver taget efter 2.afhentning	

*Hvis der anvendes sommerfugl skal der tages et spildglas først.
Alle prøver sættes i klimaskab umiddelbart efter prøvetagning