



# Instruktion

i brug af Basic Comfort High Sejlet



AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL  
– i gode hænder

## Anvendelse af Basissejlet



Når du har placeret sejlet under patienten, skal sejlet ligge sådan på sengen.



Sejlet placeres så midt sejl passer med midt ryg på patienten, og så sejlet passer med skulder og haleben



Sejlets placering.




Ben stropperne place-res korrekt (syningen på benstropen er midt på patientens lår = rød streg).

På den måde forhindres der, at stroppen glider på plads under liftningen og, at der på den måde opstår shear fra strop til patient.



Sådan skal det se ud, når benstropperne er korrekt monteret.

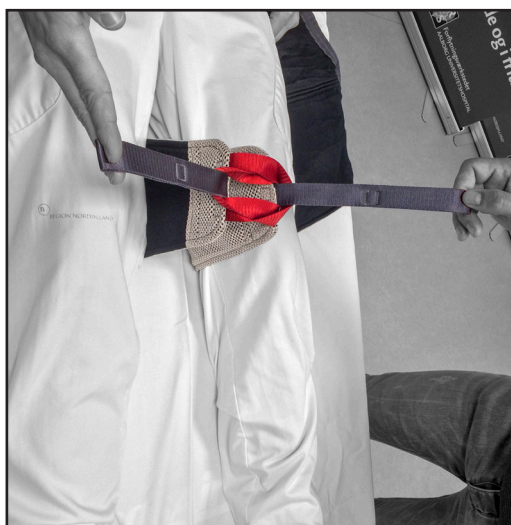

Samling af benstropper.  
Del 1 af 2




Samling af benstropper.  
Del 2 af 2



Seng bringes i siddende position, for nemmere montering af sejl på lift åg.



Kør åget ned, så du let kan sætte stropperne fra sejlet på åget.

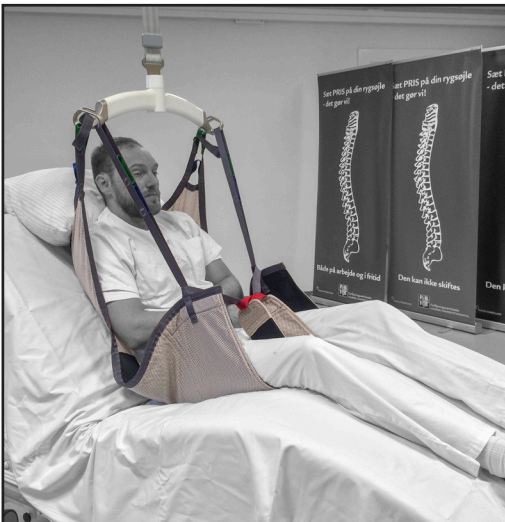

Sejlet strammes til og der tjekkes om stropperne sidder korrekt på lift åget.

## Info

- Basic komfort high sejlet, er valgt som basis sejl på Aalborg UH.
- Det yder ekstra støtte omkring hofte og lår og er velegnet til amputerede patienter.
- Det er vigtigt at vælge korrekt størrelse sejl  
(Se guideline for sejlstørrelser)
- Max patientvægt 255 kg

## **Forflytningsindsatsen**

Aalborg Universitetshospital  
Strategi og HR  
Arbejdsmiljø & Trivsel  
Hobrovej 42A  
9000 Aalborg

Folderen kan downloades fra intranetsiden,  
se QR-koden.



Oktober 2018

