


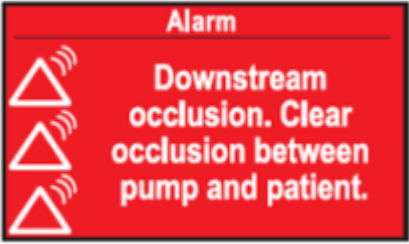

Quick problemløser til CADD-SOLIS VIP pumpe

1		<p>1. Rød alarm – "Okklusion nedadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og patient"</p> <p>A: Kan være en klemkrue mellem pumpe og patient som ikke er blevet åbnet.</p> <p>B: Der kan findes et knæk på slangen.</p> <p><u>Løsning:</u> Åben for alle klemkruer og afklar om der findes et knæk på slangen. Pumpen vil fjerne alarmen når problemet er løst og pumpen fortsætter infusionen.</p>
2		<p>2. Orange alarm – der opstod strømafbrydelse mens pumpen kørte, skift batterier</p> <p>A: Pumpen er ved at løbe tør for strøm og batterier skal skiftes.</p> <p><u>Løsning:</u> Åbn kammer ovenpå pumpen, ved at dreje på armen. Skift da batterierne og luk igen. Tænd pumpen på siden og tryk på "start" når billedet kommer frem.</p>
3		<p>3. Orange Alarm – Reservoir volumen lav</p> <p>A: Pumpen gør blot opmærksom på at der er meget lidt væske tilbage i infusionsposen.</p> <p>Tjek reservoir i posen, da det kan være glemt at nulstille reservoir volumen ved skift af infusionspose.</p> <p><u>Løsning:</u> Tryk "acceptér" og "start".</p>

4



4. Rød alarm – Luft i slange detekteret. Tryk på "Acceptér", og fyld så slangerne

A: Her er problemet luft i slangen, og pumpen vil bede om at luften fjernes før den kan køre videre.

Følg nedenstående instruktion og brug evt. billederne ovenover

1. Tast "acceptér".
2. Tast "opgaver"
3. Pumpen skriver "Fyld slange". Tast "ja"
4. Pumpen skriver "Frakobl slange fra patienten". Her skal du ikke frakoble patienten, men tast "fyld". Den mængde luft som kan være i slangen er ikke farlig for patienten, og kan derfor godt primes igennem.
5. Pumpen primer manuelt, og stopper derfor først når du trykker stop. Lad pumpen prime ca. 2,3ml igennem, og tast da "stop". Pumpen skriver "forsæt fyldning". Tast "nej".
6. Pumpen skriver "start pump". Tast "ja"

5



5. Rød alarm – Okklusion opadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og reservoir

A: Der findes et problem mellem kassettebeslag og pumpen
Løsning: Lås låsearmen op, tag kassettebeslag af og sæt dette på igen.

B: Der er en klemskrue som ikke er åben.

Løsning: Undersøg om alle klemskruer er åbne og at der ikke findes et knæk på slangen.