

# VEJLEDNING



## Anvendelse af koblede antibiotika (Vial-Mate)

Hætteglasset er tilkoblet en Viaflo infusionspose ved hjælp af en Vial-Mate overføringskanyle

- **Anvendes antibiotikasæt med fastmonterede grene;** fyld sæt med NaCl fra beholder til efterskyl og luk klemmer på sættet. Sæt en gren i Viaflo posen.
- **Anvendes antibiotika sæt med connectslange;** sæt connect slange i Viaflo posen og påfyld med NaCl. Luk klemme på connectslange.



### Aktivering

1. Hold om stemplet og drej Vial-Matens base mod uret for at åbne stemplet.
2. Hold i Viaflo posens hårde port og skub stemplet ind i basen indtil aktivering sker. Dette gøres nemmest ved at stille hætteglasset på et bord og presse ned.

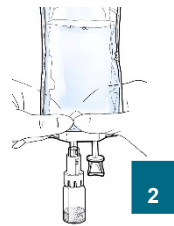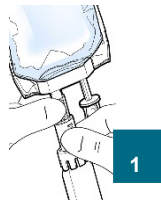

### Blanding


3. Hold posen med hætteglasset nedad. Pres på posen indtil hætteglasset er halvt fyldt med væske. Opløs tørstoffet med cirkelbevægelser – ryst ikke hætteglasset.
4. Hold posen med hætteglasset opad. Pres på posen så opløsningen løber fra hætteglasset tilbage i posen.

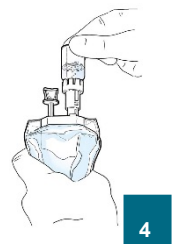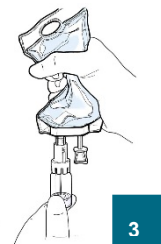

*Trin 3 og 4 kan gentages indtil alt tørstof er opløst og overført til Viafloposen.*

### Deaktivering

5. Hold i toppen af Viaflo posen og træk stemplet ud af basen
6. Vial-Matens base drejes med uret for at lukke stemplet

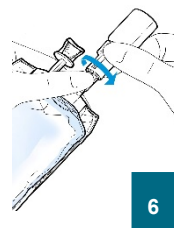



### Fyldning af infusionsæt

7. - **Anvendes antibiotikasæt med fastmonterede grene;** Da sættet er forfyldt med NaCl, er sættet klar til brug.
8. - **Anvendes antibiotika sæt med connectslange;** Fyld et infusionsæt efter gældende retningslinjer med NaCl via spike. Sæt Viaflo posen med connect-slangen på sættet.

### Administration

9. Vend posen et par gange.
10. Tilslut infusionsættet til venekanyle.
11. Åben klemmen på gren med antibiotikablandingen.
12. Infusionshastigheden indstilles med rulleklemmen. Placeres rulleklemmen i midten svarer det til 40-60 dråber/min. dvs. ved 50 ml er indløbstiden ca. 20 min
13. Lad infusionsættet løbe tomt.
14. Åbn klemmen på gren med NaCl – hermed skylles sættet for restdosis.

### Affaldshåndtering

15. Systemet er nu helt tomt og skal forblive samlet.
16. Fjern og bortskaf systemet inkl. hætteglas som kritisk risikoaffald