
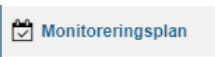
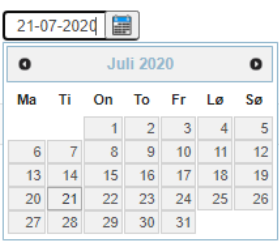



# Opret og ændre monitoreringsplan og slet spørgeskema i OpenTele



Først når du har valgt Tildel eller Opdater, er oplysninger gemte. Du kan ændre i oplysninger ved at vælge Rediger.

Handling	Forklaring	Navigation
<b>Frem søg evt. patient</b>	For at fremsøge patient vælges Find patient. Der kan søges på CPR og/eller navn. Der fremkommer en Patientliste, hvorfra patient vælges.	
<b>Vælg Monitoreringsplan</b>	Vælg fanebladet Monitoreringsplan. En monitoreringsplan skal bestå af en startdato og div. spørgeskemaer med angivelse af, hvornår patient skal udføre hvert spørgeskema.  Obs. uden monitoreringsplan kan patient logge ind på sit TeleKit, men vil se en blank skærm. Patient kan kun indsende måledata, hvis der er tildelt en monitoreringsplan.	
<b>Ret Startdato</b>	I Monitoreringsplan ses Startdato, som er forudindstillet til dags dato. Rediger Startdato til den dato, hvor patient bliver oplært i at bruge sit TeleKit og begynder at indsende målinger. Dato påføres eller vælges via kalender.  Startdato er den dag OpenTele løsning registrerer, patient skal starte med at indsende målinger. Der kommer derfor unødige blå alarmer, hvis Startdato ikke ændres.  Undgå at vælge Vis kun på svar dag, idet patient så kun kan se og anvende spørgeskemaer på monitoreringsdage.	
<b>Tildel gruppe af spørgeskemaer</b>	Vælg Tildel/Fjern Spørgeskemagrupper. Vælg ønsket Spørgeskemagrupper. Herved ses spørgeskemaer samt tidspunkt og ugedag for disses udførelse. Vælg Tilføj for at tildele spørgeskemagrupper til patient og Opdater.  Obs. først når du har valgt Tilføj, kan se spørgeskemaer ved Tildelte spørgeskemagrupper og har opdateret er spørgeskemaer gemt.  Spørgeskemagrupper er mhp at lette arbejdsgangen for kliniker samt sikre, at patient får de spørgeskemaer, der er defineret af en sundhedsfaglig gruppe.	
<b>Ændre Monitoreringsplan</b>	Du kan redigere et spørgeskema fx ændre ugedag og tidspunkt hvor patient skal indsende målinger.	
<b>Slet spørgeskema</b>	Et spørgeskema fra en Spørgeskemagrupper kan kun slettes, hvis du vælger Tildel/Fjern Spørgeskemagrupper og sletter hele Spørgeskemagrupperen.  Efterfølgende skal du tildele de spørgeskemaer patient skal have enkeltvis. Vælg Tildel Spørgeskema, fremsøg ønsket skema, vælg Ugedage – Én eller flere daglige målinger og indsæt ugedag og tidspunkt for målinger.	