

Blodtryksmåler – Bestilling af anden manchetsørrelse og skift af manchetsørrelse


Formål


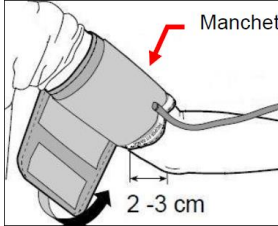
At blodtryk måles med den manchetsørrelse, der passer til den enkelte borger/patient for at sikre valide målinger. TeleKit leveres med blodtryksmanchet str. medium og skal afhængigt af størrelsen på borgerens/patientens arm evt. skiftes til størrelse lille eller stor.



Obs

- Skift af blodtryksmanchet gøres af kommunalt personale og oftest i forbindelse med oplæring i brug af TeleKit.
- Blodtryksmanchet - mål på arm: Lille 18-22 cm. Mellem 22-32 cm. Stor 32-45 cm.
- Skift til stor blodtryksmanchet: Manchetsørrelse kan blot skiftes ud.
- Skift til lille blodtryksmanchet: Blodtryksapparat nulstilles og luftgennemstrømning reguleres:
 1. Blodtryk måles med normal manchetsørrelse på person med normalt blodtryk og normal arm størrelse
 2. Luftgennemstrømning reguleres og der måles blodtryk med lille manchetsørrelse på person med lille arm størrelse

Handling	Forklaring	Illustration
Bestilling af manchetsørrelse	Kommunen har et mindre lager af manchetsørrelse small og størrelse large, som der tages af. Ved behov for opfyldning af lager bestilles manchetsørrelser i eSHOP . Ved bestilling oplyses leveringsadresse hos kommunen. De der bestiller skal have en brugerkonto. Se instruks "Anvendelse af TeleCare Nord's indkøbsportal i Atea eSHOP".	
Ved skift til stor manchetsørrelse	Denne kan blot skiftes ud.	
Ved skift til lille manchetsørrelse	Følg nedenstående vejledning:	
Nulstil blodtryksapparatet	Blodtryksapparatet skal "nulstilles" inden skift til lille manchetsørrelse. Dette gøres ved to gange at måle et normalt blodtryk med den almindelige manchetsørrelse og den normale luftstrøm (som apparatet allerede er indstillet til). Derved slettes eventuelle høje værdier i apparatet.	
Indstil luftudstødningshastighed	Lufthastigheden ved anvendelse af lille manchetsørrelse skal sættes ned. På bagsiden af blodtryksapparatet til venstre for mærkat med produktoplysninger sidder en regulator. Denne er dækket af en lille sort rund plastmærkat. Fjern dette forsigtigt.	

Handling	Forklaring	Illustration
	<p>Under mærkaten sidder en skruekærv. Drej denne til venstre fra oprindelig position, eventuelt med papirklips. I første omgang drejes en ¼ omgang.</p>	
<p>Skift manchet på apparat. Sæt manchetten på armen</p>	<p>Blodtryksmanchet skiftes til lille manchet. Sæt manchetten på borgens arm og tryk på start for at starte en måling. Hvis blodtryksapparatet registrerer en måling er lufthastigheden passende. Hvis der ikke kommer en måling, afbryd da målingen ved at trykke på start igen. Der skal reduceres yderligere. Drej endnu en ¼ omgang og afprøv ny måling. Dette gentages indtil det virker. Påsæt mærkat igen</p> <p>Vær opmærksom på, at måling med lille manchet ofte tager længere tid.</p>	
<p>Markering af blodtryksapparat</p>	<p>Blodtryksapparatet skal synligt markeres. Der påsættes rundt rødt klistermærke. Disse klistermærker kan udleveres af TeleCare Nords servicefunktion, så hver kommune har eget lager.</p> <p>Den blodtryksmanchet, der ikke skal anvendes, lægges i TeleKit kufferten.</p> <p>Markering med klistermærke er, så Atea ved eventuel senere afhentning kan se, at apparatet er indstillet til lille manchet. Dette da blodtryksapparatet efterfølgende skal kunne klargøres med en mellem blodtryksmanchet.</p>	