

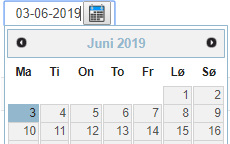

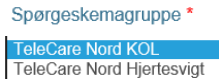


Opret monitoreringsplan til ny patient i ny OpenTele

Fase	Forklaring	Navigation
	I OpenTele bevæger du dig videre via faneblade på Hovedmenu og Patientmenu. For at komme videre på de enkelte sider vælges Næste. Først når du har valgt Gem eller Opdater, er oplysninger gemte. Du kan ændre oplysninger ved at vælge Rediger. Obs. Husk at åbne linket til ny OpenTele i Google Chrome.	
<b>Fremsøg evt. patient</b>	Patient skal evt. fremsøges. Vælg da Find patient. Der kan søges via CPR og/eller navn. Der fremkommer en Patientliste, hvorfra Patient vælges.	
<b>Vælg monitoreringsplan</b>	Hvis du ikke er på fanebladet Monitoreringsplan skal dette vælges, når patient er fremsøgt. En monitoreringsplan skal bestå af en startdato samt div. spørgeskemaer med angivelse af, hvornår patient skal udføre hvert spørgeskema.	
<b>Ret startdato</b>	I Monitoreringsplan ses Startdato, som er forudindstillet til dags dato. Rediger Startdato til den dato, hvor patient bliver oplært i at bruge sit TeleKit. Dato påføres eller vælges via kalender.  Derved er Startdato den første dag patient reelt indsender målinger.  Startdato er den dag, OpenTele løsningen har registreret, at patient skal starte med at indsende målinger. Der vil derfor fremkomme unødige blå alarmer grundet manglende målinger, hvis Startdato ikke ændres.  Undgå at vælge Vis kun på svar dag, idet patient så udelukkende kan se og anvende spørgeskemaer på monitoreringsdage.	
<b>Tildel gruppe af spørgeskemaer</b>	Vælg altid Tildel gruppe af spørgeskemaer og den spørgeskemagrupper, patient skal tilhøre fx KOL.  Ved valg af Gruppe af spørgeskemaer får ny patient de rette spørgeskemaer. Disse spørgeskemaer samt hvor tit de skal anvendes, er defineret af en sundhedsfaglig gruppe. Gruppen af spørgeskemaer er klargjort for at gøre arbejdsgangen lettest muligt for den enkelte kliniker.  De spørgeskemaer, der er tilknyttet spørgeskemagruppen, ses nu samt tidspunkt og ugedage for deres udførelse.	  
<b>Gem</b>	Vælg Tilføj valgte, hvorved alle spørgeskemaer i gruppen gemmes.  Ved behov for individuel tilretning fx hvis patient ikke kan udføre Rejse-sætte-sig-test kan spørgeskema fjernes ved Handling. Tidspunkt for udførsel af spørgeskema kan redigeres ved Handling. Vær da obs. på at vælge Opdater for at gemme.	