

Easypump® II

Pumpen tages ud af køleskab ca. ½ time før brug
Inden pumpen tilkobles tjekkes iv adgangen

Pumpen tilkobles

- Åbn den hvide klemme
- Kontrollér at pumpen fungerer ved at observere en synlig dråbe ved patientkonnektoren
- Tilslut pumpen til patienten
- Fiksér flowregulatoren (det sidste slangestykke fra filteret til patientkonnektoren) så det er i kontakt med huden
- Kontrollér at udluftningshullet på filteret vender væk fra patienten og ikke er tildækket med plaster
- Placér pumpen i niveau med patientens iv adgang

Easypump® II

Hvis der er tvivl om hvorvidt pumpen løber:

- ✓ Kontrollér at den hvide klemme på infussionslangen er åben
- ✓ Vej pumpen, vent en time eller to, vej pumpen igen - vægten skal have ændret sig
- ✓ Kontrollér at pumpen ikke opbevares for koldt (skal opbevares ved stuetemperatur)
- ✓ Kontrollér at flowregulatoren (det sidste slangestykke fra filteret til patientkonnektoren) er i kontakt med huden
- ✓ Kontrollér at filteret ikke er tildækket

